

**Petra Zwaller***Haldenhof 1, 72144 Dußlingen**Fon: +49 (0)7072 / 92 38 555**Mobil: +49 (0)176 / 403 65 665*

## Erwärmung für den Hund

### **In der Mikrowelle:**

Bei max. 600 Watt, 5 – 8 Minuten erwärmen. Zwischendurch Moorträger durchkneten, damit sich die Wärme besser verteilt! Bei Bedarf in 10-Sekunden Schritten verlängern, bis der Moorträger die gewünschte Wärme erreicht hat. Die Anwendungstemperatur für den Hund liegt bei max. 60 Grad Celsius. Den Moorträger nach der Erwärmung in die **EQUISPA** - Taschen von den Stoffelementen einlegen und an die zu behandelnde Stelle anbringen. Einwirkungszeit je nach Indikation. An den Gliedmaßen ca. 15 – 20 Minuten, am Rumpf und Hals bis max. 30 Minuten.

### **Im Wasserbad:**

Der Moorträger beinhaltet einen Wärmespeicher, bestehend aus einer Naturmoorfüllung. Die Außenfolie hat eine äußerste Hitzebeständigkeit von 80°C.

Erwärmen Sie den Moorträger in einem geeigneten Wasserbad bei einer Wassertemperatur von ca. 70°C bis 80°C. Die regelmäßige Erwärmungstemperatur sollte 80°C auf keinen Fall überschreiten. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers. Nach ca. 30 Minuten erreichen die Wärmespeicher die gewünschte Temperatur.

Bei der Erwärmung im Wasserbad, darf der Moorträger nicht mit dem Boden des Erwärmungsgerätes in Berührung kommen, da die Folie durch Überhitzung beschädigt werden könnte. Dies verhindert man, indem ein Sieb auf den Boden des Geräts gelegt wird.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise:

### **Sicherheitshinweis:**

Achtung! Lassen Sie den Moorträger beim Erhitzen nicht unbeobachtet! Sollte sich das Produkt aufblähen, schalten Sie die Mikrowelle, den Wärmeschränk oder das Wasserbad aus und überprüfen Sie den Moorträger nach dem Abkühlen auf Schäden.

Überhitzen des Kissens kann zu Rissen und undichten Stellen führen. Den Moorträger nicht mit heißem Metall in Berührung bringen. Vor Gebrauch Handtuch unterlegen!

Moorträger Gr. 1 (30x40 cm), Gr. 2/3 (46x33 cm) (Doppelkammer/durchgehend)

Garantie: 3 Monate ab Rechnungsdatum

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1. Es bietet Ihnen sanfte Heilung und Entspannung mit natürlichen Inhaltsstoffen. Das heilende Moor wird aus regenerativem Abbau in Deutschland aus unserem staatlich anerkannten Heilmoorgebiet gewonnen.

## Anwendung in der Kältetherapie – ideal bei Entzündungen

Kälte dämpft Entzündungen, da die verringerte Körpertemperatur die Aktivität der Entzündungsmediatoren hemmt. Zunächst werden bei der Kältetherapie Gefäßreaktionen ausgelöst und die Muskeln spannen sich an. Das Schmerzempfinden reduziert sich. Bei längerer Anwendung reduziert sich die Muskelaktivität, die Muskelspannung wird gesenkt und Verkrampfungen lockern sich.

### Anwendungsgebiete:

Entzündungen, Schwellungen, Ödeme, Rheumatische Arthritis, Hämatome, Prellungen, Verstauchungen, Ataxien (Lähmungen im Nervensystem), hohe Außentemperaturen, Fieber

### Kälteanwendung:

Im Kühlschrank bei ca. 5 – 15°C, dauerhafte Lagerung im Kühlschrank möglich.

### Wichtige Hinweise:

Vor der Anwendung bitte die Temperatur vorsichtig mit dem Handrücken testen. Bedenken Sie, dass bereits bei Temperaturen ab 50°C Verbrennungen auftreten können. Der Moorträger darf nicht verwendet werden, wenn der Hund (wie z.B. bei Sedierung oder Narkose) Wärme oder Kälte nicht wahrnehmen kann.

Ausnahme besteht unter tierärztlicher Aufsicht.

Verwenden Sie den Artikel unter Beobachtung des Hundes.

Durch spitze und scharfe Gegenstände oder Überhitzung können Schäden an dem Moorträger entstehen. Dieser darf nicht mehr verwendet werden!

Bitte überprüfen Sie den Moorträger vor jeder Anwendung, nach dem Erwärmen, auf Schäden. Sollte der Moorträger undicht sein, bitte nicht mehr verwenden, da andere Gegenstände verschmutzt werden. Der neue Moorträger ist aus besonders widerstandsfähiger Folie! Eine wirklich grüne und umweltfreundliche Alternative, da die Folie anteilmäßig aus natürlichem Kautschuk hergestellt wird. Naturkautschuk ist umweltfreundlich und zugleich ein nachwachsender Rohstoff.

Keine PVC Weichmacher und anhaftende Latexproteine. Durch ein aufwendiges Waschverfahren werden allergieauslösende Proteine und der Puder weitestgehend entfernt.

- lange Haltbarkeit
- geringe Verschleißanfälligkeit
- Produktsicherheit durch zahlreiche Zertifikate und Prüfberichte
- frische, attraktive Farbe
- sehr gut modellierbar – durch die gute Dehnbarkeit der Folie